


Capillary tube

1. สิ่งส่งตรวจ : Capillary Blood
2. ภาชนะบรรจุ: Capillary tube (Sodium heparinized : แถบแดง)

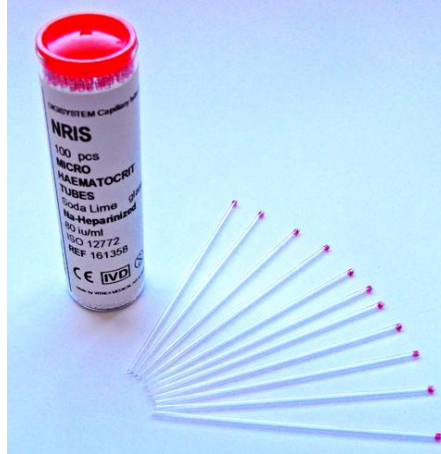

3. วิธีเก็บ :

- 3.1 ตรวจสอบชื่อ-สกุล ผู้ป่วยที่ภาชนะ และ/หรือใบส่งตรวจ ให้ถูกต้อง
ถามชื่อ-สกุลผู้ป่วยทุกครั้ง โดยให้ผู้ป่วยตอบเอง ก่อนเจาะเลือด
- 3.2 ใช้สำลีชุบ 70% แอลกอฮอล์เช็ดฆ่าเชื้อผิวหนังบริเวณที่จะเจาะ
- 3.3 เจาะเลือดใส่ Capillary tube (Sodium heparinized : แถบแดง) Mix เลือด
ไปมา 3-5 ครั้ง
- 3.4 อุดด้วยดินน้ำมันข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้น

4. ปริมาตร : อย่างน้อย 2 ใน 3 ของ Capillary tube

5. รายการตรวจวิเคราะห์ : Hct, MB, CRP, Confirm ABO group สำหรับงานธนาคาร เลือด

6. การนำส่งและการเก็บรักษา : นำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง หลังเก็บตัวอย่าง กรณีส่งตรวจ MB ให้ใส่ในภาชนะที่บัสแสง

7. หมายเหตุ : **** ห้ามบีบหรือเค้นบริเวณที่เจาะ เพราะอาจทำให้เม็ดเลือดแดงแตก หรือ เกิดการปนเปื้อน เนื้อเยื่อและของเหลวทำให้ผลผิดพลาด****