

Lithium heparin Blood

1. สิ่งส่งตรวจ : Lithium heparin Blood
2. ภาชนะบรรจุ : Lithium heparin tube (จุกเขียว)



3. วิธีเก็บ :

- 3.1 ตรวจดูชื่อ-สกุล ผู้ป่วยที่ภาชนะ และ/หรือใบส่งตรวจ ให้ถูกต้อง
ถามชื่อ-สกุลผู้ป่วยทุกครั้ง โดยให้ผู้ป่วยตอบเอง ก่อนเจาะเลือด
- 3.2 ใช้สำลีชุบ 70% แอลกอฮอล์เช็ดฆ่าเชื้อผิวหนังบริเวณที่จะเจาะ
- 3.3 ไม่ควรรัดแขนผู้ป่วยนานเกิน 1 นาที เนื่องจากอาจทำให้ค่าของการตรวจ
บางอย่างเปลี่ยนแปลงไป
- 3.4 เจาะเลือดใส่หลอดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด Lithium heparin 6 mL
Mix กลับหลอดเลือดไปมา 8 ครั้ง
- 3.5 การเจาะเลือดส่งตรวจหลายอย่าง ให้ใส่เลือดเรียงตามลำดับ ดังนี้

Hemoculture → Sodium citrate → Clotted blood → **Lithium heparin** →

EDTA → Sodium fluoride

4. ปริมาตร : 6 mL
5. รายการตรวจวิเคราะห์ : Chemistry, Immunology
6. การนำส่งและการเก็บรักษา : นำส่งภายใน 2 ชั่วโมงหลังเจาะเก็บเลือด

7. **หมายเหตุ :** เด็กแรกเกิดที่เจาะเลือดได้น้อย ให้ใช้หลอด Micro lithium heparin tube (จุกเขียว) 0.5 mL

