

การเก็บตัวอย่างที่ผิวหนัง

ภาชนะบรรจุ แผ่นสไลด์



1. วิธีเก็บ ผิวหนัง Lesion

- 1.1 ทำความสะอาดผิวหนังด้วย 70% Alcohol
- 1.2 ใช้ Blade ขูดสะเก็ดผิวหนังบริเวณขอบแผล
- 1.3 ใส่ในแผ่นสไลด์ แล้วประกบด้วยสไลด์อีกแผ่นหนึ่ง
- 1.4 พันปลายสไลด์ทั้ง 2 ด้าน ด้วยเทปกาวใสในถุงซิปล็อค

รายการตรวจวิเคราะห์ KOH/Scabies

2. วิธีเก็บ ผิวหนัง Vesicle

- 2.1 ทำความสะอาดผิวหนังด้วย 70% Alcohol
- 2.2 ใช้ Blade สกัดตุ่มน้ำให้เปิดออก ใช้สำลีซับน้ำให้แห้ง
- 2.3 ขูดที่ฐานตุ่มน้ำ ป้ายใส่แผ่นสไลด์ (รอสิ่งส่งตรวจแห้งแล้วใส่ถุงซิปล็อค)

รายการตรวจวิเคราะห์ Tzanck smear

การนำส่งและการเก็บรักษา นำส่งห้องปฏิบัติการทันที ถ้าไม่สามารถส่งได้ทันที ตั้งที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง