

## Sodium fluoride Blood

1. สิ่งส่งตรวจ : Sodium fluoride Blood
2. ภาชนะบรรจุ : NaF tube (จุกเทา)



### 3. วิธีเก็บ :

- 3.1 ตรวจดูชื่อ-สกุล ผู้ป่วยที่ภาชนะ และ/หรือใบส่งตรวจ ให้ถูกต้อง  
ถามชื่อ-สกุลผู้ป่วยทุกครั้ง โดยให้ผู้ป่วยตอบเอง ก่อนเจาะเลือด
- 3.2 ใช้สำลีชุบ 70% แอลกอฮอล์เช็ดฆ่าเชื้อผิวหนังบริเวณที่จะเจาะ
- 3.3 ไม่ควรรัดแขนผู้ป่วยนานเกิน 1 นาที เนื่องจากอาจทำให้ค่าของการตรวจ  
บางอย่างเปลี่ยนแปลงไป กรณีส่งตรวจ Lactate ไม่ควรรัดแขน เพราะจะทำให้  
ค่าสูงขึ้น อาจหลีกเลี่ยงโดยใช้ arterial blood แทนได้
- 3.4 เจาะเลือดใส่หลอดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด Sodium fluoride 2 mL  
Mixกลับหลอดเลือดไปมา 8 ครั้ง
- 3.5 การเจาะเลือดส่งตรวจหลายอย่าง ให้ใส่เลือดเรียงตามลำดับ ดังนี้

Hemoculture → Sodium citrate → Clotted blood → Lithium heparin →  
EDTA → *Sodium fluoride*

4. ปริมาตร : 2 mL
5. รายการตรวจวิเคราะห์ : Glucose, lactate
6. การนำส่งและการเก็บรักษา :
  - 6.1 นำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง หลังเก็บตัวอย่าง

6.2 Lactate หลังเจาะเลือดแล้วนำหลอดเลือดใสในที่เก็บรักษาอุณหภูมิ 4 °C พร้อม  
ก็นำส่งห้องปฏิบัติการทันที

6.3 Glucose Tolerance นำส่งห้องปฏิบัติการทันที หลังเก็บส่งตรวจทุกครั้ง

7. หมายเหตุ : ไม่มี