

การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ Wet smear

สิ่งส่งตรวจ Cervical swab, Vaginal swab

ภาชนะบรรจุ 1. Swab ใส่หลอดแก้วสะอาด



2. แผ่นสไลด์



1. วิธีเก็บ Cervical swab, Vaginal swab

1.1 ทำความสะอาดผิวหนังด้วยน้ำเกลือปราศจากเชื้อ

1.2 ใช้ไม้พันสำลีป้ายสิ่งส่งตรวจใส่แผ่นสไลด์ (รอสิ่งส่งตรวจแห้งแล้วใส่ถุงซิปล็อค) แล้วนำไม้พัน

สำลีใส่ในหลอดแก้วสะอาด หยอด NSS 2-3 หยด

การนำส่งและการเก็บรักษา นำส่งห้องปฏิบัติการทันที ถ้าไม่สามารถส่งได้ ตั้งที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง

สิ่งส่งตรวจ ผิวน้ำ

ภาชนะบรรจุ แผ่นสไลด์



วิธีเก็บ ผิวน้ำ Lesion

1. ทำความสะอาดผิวน้ำด้วย 70% Alcohol
2. ใช้ Blade ขูดสะเก็ดผิวน้ำบริเวณขอบแผล
3. ใส่ในแผ่นสไลด์ แล้วประกบด้วยสไลด์อีกแผ่นหนึ่ง
4. พันปลายสไลด์ทั้ง 2 ด้าน ด้วยเทปกาวใสในถุงซิปล็อค

การนำส่งและการเก็บรักษา นำส่งห้องปฏิบัติการทันที ถ้าไม่สามารถส่งได้ทันที ตั้งที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง