


วิธีการเก็บตัวอย่างแบบ Cytobrush HPV DNA TEST (แพทย์เป็นผู้เก็บตัวอย่าง)

1. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือ alcohol 70%
2. เปิดฝากระปุกเก็บตัวอย่าง อย่างระมัดระวัง ตั้งเตรียมไว้ในที่ราบ นิ่ง



3. ดึงช่องไม้เก็บตัวอย่าง ระวังอย่าสัมผัสโดนส่วนปลายไม้เก็บตัวอย่าง และห้ามนำไม้ Cytobrush เก็บตัวอย่างจุ่มในกระปุกน้ำยา ก่อนเก็บตัวอย่าง
4. หมุนแปรงอย่างน้อย 10 รอบ ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ห้ามหมุนกลับในทิศทวนเข็มนาฬิกา

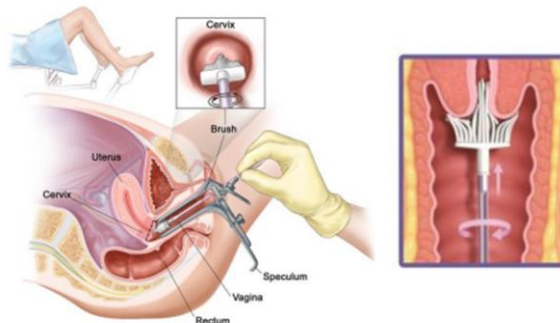

5. จุ่มไม้ Cytobrush ลงในกระปุกเก็บตัวอย่างทันที ห้ามวางกับพื้น จุ่มให้ปลายไม้ Cytobrush ถึงก้นกระปุก
6. แกว่งไม้ Cytobrush เป็นวงกลมภายในกระปุกเบาๆ 10 ครั้ง ระวังอย่าให้น้ำยากระเด็น
7. ดึงไม้ Cytobrush ขึ้นเหนือหน้าเล็กน้อย สะบัดปลาย Cytobrush กับข้างกระปุกน้ำยาด้านในให้หมดก่อนดึงออกจากกระปุก ปิดฝากระปุกให้สนิทโดยรอยสีดำข้างฝาของกระปุกจะอยู่ตรงกับขีดสีดำข้างตัวกระปุกพอดี.



รูปภาพบางส่วน : อ้างอิงจาก แนวทางการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วย HPV DNA TEST : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
(ฉบับ ม.ค. 2566)